

# COLDISEPT



## Sprej za nos

### Uputstvo za upotrebu

Medicinsko sredstvo u obliku spreja za nos, eliminiše osećaj suvoće i iritacije nosne sluznica, štiti od štetnih spoljnih faktora.

**COLDISEPT Sprej za nos** vlaži i umiruje nosnu sluznicu, i pomaže regeneraciju i eliminiranje upalnih procesa.

Ovaj proizvod kreira sloj u obliku gela koji štiti od bakterija i virusa i pomaže u regeneraciji membrane sluznice.

Svojstva ovog proizvoda su rezultat aktivnosti mineralnih soli i ekstrakata algi

### SASTAV:

Prečišćena voda, nanokoloidno srebro, ekstrakt Chondrus crispus (karagenan), sorbitol, glicerol, mineralne soli (kalijum dihidrogen fosfat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, kalcijum hlorid heksahidrat, magnezijum hlorid heksahidrat), natrijum benzohidrat, limunska kiselina.

### INDIKACIJE

Koristiti u svim slučajevima suvoće i iritacije nosnog kanala, bez obzira na uzrok.

Koristiti svakako u slučajevima:

- atropičnog rinitisa
- infektivnog ili alergijskog rinitisa
- kod upotrebe lekova koji su oštetili epitel nosne sluznice
- sinusitisa
- zagađenog vazduha ili prašine
- visokih temperatura
- kod odraslih pacijenata
- suvoće izazvane centralnim grejanjem ili klimatizacijom vazduha
- pušenja.

### NEŽELJENI EFEKTI

Neželjeni efekti **COLDISEPT Spreja za nos** nisu poznati, međutim kod posebno osetljivih osoba, alergijske reakcije ne mogu biti isključene.

Ukoliko se javi alergijska reakcija, treba prestati sa korišćenjem proizvoda.

### DODATNE INFORMACIJE I MERE OPREZA

Ne koristite proizvod ukoliko ste alergični na bilo koji od sastojaka.

Ne koristite proizvod ukoliko ste alergični na srebro.

Sprečite da dođe do kontakta sa očima.

Prekinite sa korišćenjem proizvoda u slučaju bilo kakvog alarmantnog simptoma.

Ne koristite nakon isteka roka upotrebe!

U slučaju kontaminacije, skinuti aplikator, oprati i otkuvati ga ili ga dobro isprati u vreloj vodi.

Trudnice i deca ispod 6 godina mogu da koriste proizvod samo pod medicinskim nadzorom.

Proizvod može biti korišćen duži vremenski period bez rizika od zavisnosti, neželjenih efekata ili komplikacija.

Bilo koji ozbiljni incident koji se javio u vezi sa medicinskim sredstvom treba da bude prijavljen proizvođaču i nadležnom organu zemlje u kojoj pacijent živi.

## UPOTREBA I DOZIRANJE

Koristite **COLDISEPT Sprej za nos** 3-4 puta na dan, u zavisnosti od individualnih potreba.






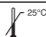
1. Pritisnuti dispenser nekoliko puta pre prve upotrebe.
2. Postavite aplikator u nosni kanal.
3. Aplicirajte 1-2 doze u svaku nozdrvu.

## ČUVANJE


Čuvati na temperaturi do 25°C, na suvom mestu, dalje od domašaja dece.

**Pakovanje od 20ml**

### Značenje simbola:

	Broj serije
	Rok upotrebe
	Pročitati uputstvo za upotrebu
	Datum proizvodnje
	Proizvođač
	Temperaturno ograničenje

Uputstvo za upotrebu izdato: 01.09.2020.

 **Proizvođač: ARKONA**  
**Laboratorium Farmakologii**  
**Somatologicznej, Nasutów 99C,**  
21-025 Niemce, Poljska

**Ovlašćeni predstavnik**  
**proizvođača:**

Alpen Pharma d.o.o. Ulcinjska 13,  
sprat 4, stan 10, 11050 Beograd  
(Zvezdara), Republika Srbija



**Proizvedeno u EU za:**  
**Alpen Pharma AG,**  
Bern, Switzerland



**Rešenje o registraciji:**  
515-02-00353-21-006 od 01.02.2022.